



EndoTeam
HEALTHCARE

ENDOSKOPI TEMİZLEME TALİMATI



1

- Endoskopi ile yapılan işlemden hemen sonra endoskopi işlemciye henüz takılıyken, hasta içerisine giren (insertion) tüpün dış yüzeyini deterjanlı solüsyon ile ıslatılmış yumuşak bir bez veya gazlı bez ile silin.



2

- Emme kanallarından sıra ile deterjanlı su ve hava verin. Su şişesinin kolunu "drain" konumuna ayarlayarak, hava ve su kanallarının içine sıra ile hava püskürtün.



3

- Endoskopi cihazını işlemciden (veya ışık kaynağından) ayırın. Koruyucu kapağı PVE konektörüne takın.
- Fiber endoskoplar gibi portatif endoskoplar için kullanıcı kitaplarında belirtilen uygun koruyucu kapakları kullanın.



4

- Endoskop üzerindeki valfler, koruyucu kapaklar gibi sökülebilir tüm bileşenleri çıkarın ve deterjanlı solüsyon ile ayrı ayrı temizleyin.



5

- Kaçak testini yapın (Kuru test). Kaçak testine, endoskopa çeşitli açıldırımlar vererek devam edin. Eğer basınçta düşme oluyorsa, testi kesin ve endoskopi çantasına koyarak
- EndoTeam Medikal** servisine gönderin.



6

- Islak kaçak testi için, endoskopi tamamen deterjanlı solüsyon içerisine yatırın. Kaçak testine, endoskopa çeşitli açıldırımlar vererek devam edin. Eğer basınç da düşme oluyorsa, testi kesin.
- Endoskopi çantasına koyarak **EndoTeam Medikal** Servisine gönderin. Test tamamlanınca deterjanlı solüsyondan çıkartıp, kaçak test cihazını endoskoptan ayırın.



7

- Her zaman ilgili fırça ile sıvı yüzeyinin altında, biyopsi kanal girişi de dahil olmak üzere tüm serbestçe erişilebilir kanalları, temizleyin.



8

- Fırçalama işlemine PVE konektöründen başlayın.



9

- Valf silindirlerini, valfleri, distal kafa ve koruyucu kapaklar ile çıkartılabilir tüm bileşenleri fırçalayın.



10

- Son olarak, tüm kanalları kontrol gövdesinden distal kafaya doğru fırçalayın. Kanalların deterjanlı solüsyonla doldurmadan önce tüm temizleme aksesuarlarını takın.
- Tüm uygulama zamanlarını üretici talimatlarına bakarak yapın.



11

- Endoskopi ve tüm bileşenlerini deterjanlı solüsyon içerisinden çıkarın.
- Tüm kanalları ve dış yüzeyi temiz su ile durulayın.



12

- Valf, distal kafa, koruyucu kapaklar ve diğer çıkarılabilir bileşenleri dezenfekte solüsyonuna batırın ve ardından endoskopi tümüyle dezenfekte solüsyonuna batırın.



13

- Tüm kanallardan dezenfektan sıvısının geçmesini sağlayın.
- Tüm uygulama zamanını ve dezenfektan konsantrasyonunu üretici talimatları doğrultusunda yapın.



14

- Endoskopi ve çıkarılabilir tüm bileşenleri dezenfekte sıvısından çıkarın. İç kanalları, dış yüzeyleri ve çıkarılabilir tüm bileşenleri steril su ile durulayın.
- Kanalları kurutun. Koruyucu kapak ve temizleme adaptörlerini (eğer varsa) çıkarın.
- O-ringleri kontrol edin, gerekiyorsa değiştirin.



15

- Endoskopi tozsuz ve iyi havalandırılmış kabin içerisinde koruyun.
- Valf, distal kafa koruyucu kapakları ve diğer çıkarılabilir bileşenleri endoskoptan ayrı bir yerde saklayın

NOT: Yalnızca Cihaz üreticisinin önerdiği (Önerilen malzeme listesinde bulunan) deterjan ve dezenfektanları kullanın. 12. ve 13. basamakta anlatılan işlemler otomatik temizleyiciler ile de yapılabilmektedir. Bu durumda su sıcaklığı 60° C yi geçmemelidir. Kaçak testi esnasında basınç 0,2 barı geçmemelidir.

Web : www.endoteam.com.tr

Mail : info@endoteam.com.tr

Tel : +(90) 506 242 66 76

Adres : Ahimesut mahallesi 1905 sokak Altınöz İş Merkezi B/37
Etimesgut / Ankara